



Salviette disinfettanti detergenti per superfici e dispositivi medici non invasivi

Germocid Wipes 220 in barattolo Panni detergenti disinfettanti per dispositivi medici non invasivi.-
Cf 1pz



Codes produits :

Référence 50 859 6121

Galerie de produits :



Description du produit :

Panni detergenti disinfettanti per dispositivi medici non invasivi.

Germocid Wipes è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

I fazzolettini GERMOCID WIPES sono studiati specificatamente per una profonda detersione e disinfezione di dispositivi medici non invasivi (riuniti, piani di lavoro, bracciali, maniglie, turbine, maschere facciali, poggiatesta, etc.) in uso presso gli studi medico/dentistici.

Rispetto ai prodotti tradizionali, il pratico formato monouso velocizza le procedure di pulizia e disinfezione delle superfici eliminando batteri (compreso TBC), lieviti e virus (compresi HIV, HBV e HCV).

Il basso contenuto d'alcol, inserito per agevolare l'evaporazione, non danneggia i materiali.

Come si usa:

Estrarre un panno dalla confezione e strofinare sulle superfici dei dispositivi medici da pulire e da decontaminare assicurandosi che siano completamente inumiditi.

Lasciare agire per i tempi indicati. Non risciacquare.

Tempi di contatto:

Virus (Adenovirus, HIV-HBV-HCV) 5 minuti

Batteri e lieviti 5 minuti

Micobatterio Tuberculare (TBC) 60 minuti



Leggere attentamente le indicazioni e le modalità d'uso riportate in etichetta.

caractéristiques du produit :

LE DCT - TYPE: decontaminante

LE DCT - TYPE: detergente

DCT - FORME: salviette

DCT - CARACTÉRISTIQUES: salviette detergenti e decontaminanti per strumenti non invasivi e superfici di laboratorio

DCT - EFFET: detergente

DCT - EFFET: decontaminante

DCT - IL PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR: tutte le superfici

DCT - IL PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR: strumenti chirurgici non invasivi

DCT - ACTIVE CONTRE: batteri

DCT - ACTIVE CONTRE: virus

DCT - ACTIVE CONTRE: lieviti

DCT - ACTIVE CONTRE: micobatteri

DCT - ADMISSIBLES DANS: ambito odontoiatrico

DCT - ADMISSIBLES DANS: ambito ospedaliero

DCT - ADMISSIBLES DANS: laboratorio generale

DCT - DEMANDE DE DÉPISTAGE: presente

DCT - CONFORMITÉ: CE 0546

DCT - CONFORMITÉ: EN13697

DCT - CONFORMITÉ: EN14476

DCT - CONFORMITÉ: EN14348

DCT - CONFORMITÉ: EN13624

DCT - CONFORMITÉ: EN13727

DCT - CONFORMITÉ: 93/42/CEE

DCT - EMBALLAGE: box dispenser