


Disinfettante detergente inodore 1 Lt. Per superfici e dispositivi medici non invasivi

Germicida 1 Lt disinfettante senza profumo per superfici - Cf 1pz

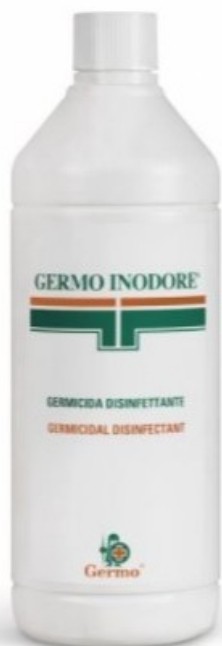

Product codes:

Reference: 50 859 5111

Product gallery:



Product description:

Germocid inodore

Disinfettante detergente per dispositivi medici non invasivi.

Germocid Inodore è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID INODORE è una soluzione disinfettante concentrata attiva contro i batteri Gram positivi e Gram negativi, funghi, micobatteri e virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV); inoltre sgrassa e deterge, non macchia, non lascia aloni ed è perfetto per materiali sensibili all'alcol.

Indicato per la detersione e la disinfezione rapida di tutte le superfici di dispositivi medici non invasivi quali letti, lettini, lettighe, maschere facciali e attrezzature varie (piani d'appoggio, braccioli, maniglie, manipoli, etc.)

solitamente in uso presso ambulatori medici o dentistici, ospedali, centri estetici, tatuatori. È indicato per la disinfezione del riunito negli studi dentistici.

GERMOCID INODORE si usa diluito in acqua in concentrazioni variabili a seconda del grado di disinfezione che si vuole ottenere. La soluzione diluita è stabile per una settimana se viene utilizzata correttamente, senza contaminazione da sostanze e/o agenti esterni.

Versare la quantità necessaria di prodotto in un litro d'acqua, applicare con spugne, panni, irrigatori, pompe manuali o meccaniche o qualsiasi altro mezzo su pareti e superfici lavabili. Lasciare agire come indicato in tabella e risciacquare.

Leggere attentamente le indicazioni e le modalità d'uso riportate in etichetta.

Product features:

DCT - TIPO: decontaminante

DCT - TIPO: detergente

DCT - FORMA: liquida

DCT - PECULIARITA': diluibile in acqua a concentrazione variabile a seconda del grado di disinfezione che si vuole ottenere inodore ed ideale per strumenti non invasivi e superfici sensibili all'alcol

DCT - EFFETTO: detergente

DCT - EFFETTO: decontaminante

DCT - UTILIZZABILE SU: tutte le superfici

DCT - UTILIZZABILE SU: strumenti chirurgici non invasivi

DCT - ATTIVO CONTRO: virus

DCT - ATTIVO CONTRO: lieviti

DCT - ATTIVO CONTRO: funghi

DCT - ATTIVO CONTRO: micoplasmi

DCT - ATTIVO CONTRO: batteri

DCT - IDONEO IN: ambito ospedaliero

DCT - IDONEO IN: laboratorio generale

DCT - IDONEO IN: ambito odontoiatrico

DCT - PROFUMAZIONE: neutro/inodore

DCT - CONFORMITA': EN14348

DCT - CONFORMITA': EN14476

DCT - CONFORMITA': EN13697

DCT - CONFORMITA': EN13624

DCT - CONFORMITA': EN13727

DCT - CONFORMITA': 93/42/CEE

DCT - CONFORMITA': CE 0546

DCT - PACKAGING: flacone